

Le modèle	Classe de protection	Valeur Moyenne d'Exposition	Note
RK 6010	FFP1 NR D	4	Sans soupape
RK 6011	FFP1 NR D	4	Avec soupape
RK 6020	FFP2 NR D	12	Sans soupape
RK 6021	FFP2 NR D	12	Avec soupape
RK 6030	FFP3 NR D	50	Sans soupape
RK 6031	FFP3 NR D	50	Avec soupape

### Application

Le masque sert à la protection du système respiratoire contre tous les types d'aérosol (poussière, fumée, brouillard).

### Avant d'utiliser le masque

- Renseignez bien sur l'information dans l'instruction. La violence des instructions peut présenter un risque ou amener aux effets irréversibles de la santé.
- On ramène le masque conformément à l'origine et la concentration des agents nocifs.
- En cas de risque de faute de l'oxygène, de concentrations excessivement élevées d'agents nocifs ou de concentrations admissibles inconnues, des dispositifs d'isolation avec alimentation en air indépendante doivent être utilisés.
- Les masques détériorés, contaminés à l'intérieur ou avec la date expirée ne peuvent pas être utilisés.

### Mode d'utilisation

- La sélection de la protection du système respiratoire conformément aux conditions opératoires est nécessaire pour protéger votre santé. En cas des maladies, prenez une consultation auprès du médecin sur la possibilité d'utilisation du masque.
- Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la fin d'un poste de travail.
- Il faut quitter le poste de travail en cas de:
  - la respiration difficile;
  - l'étourdissement ou d'autres symptômes inquiétants;
  - la défaillance d'un masque;
  - la situation d'urgence.

### Les restrictions de l'usage

- Le contenu de l'oxygène en air aspiré doit être au moins 19,5%.
- L'usage aux conteneurs, puits, petits appartements est inadmissible.
- Le masque ne protège pas des gaz et des vapeurs.
- Dans le cas de l'utilisation d'un masque par des personnes avec une barbe, les poils, le favoris, ou des cicatrices profondes dans la zone de la ligne de pilier, l'efficacité des masques est réduite.

### Mode de mettre le masque



1. Ouvrez l'emballage avec les mains propres, vérifiez-le en manque de défauts. Mettre les pouces sous la barrette nasale et la plier par deux mains (Fig. 1).
2. Séparer les bords du masque afin de le mettre en forme de demi-masque (Fig. 2). Relâcher l'élastique inférieure et la passer en arrière de la tête au niveau de la nuque (Fig.3). Mettre le masque.
3. Tenir le masque par une main sur le visage et passer l'élastique supérieure au-dessus de la partie supérieure de la tête (Fig. 4). Ajuster les élastiques et les fixer à l'aide du fixateur. Appuyez la barrette nasale sur la racine du nez en ajustant les bords du masque sur le visage (Fig. 5).
4. Vérifiez le masque à la densité du jointement: sans mouver le masque prenez dans les mains et aspirez / expirez brusquement. Si l'air pénètre à travers des bords du masque, il faut régler la position du demi-masque et des élastiques. Revérifiez la densité du jointement. Si le jointement est faible, on ne peut pas l'utiliser.

### Stockage

Les masques doivent être stockés dans un emballage du fabricant dans les locaux secs, préservés des impacts des précipitations atmosphériques et nappes d'eau libre. Stockez à la température de -30°C jusqu'à +70°C et l'humidité relative au moins 80%. Les masques défectives ou emballés ne peuvent pas être utilisés. Le délai de garantie du stockage - 5 ans si les conditions du transport et du stockage dans un emballage du fabricant sont respectées.

### Le recyclage

Après l'utilisation les masques doivent être recyclés sans danger et de manière écologique conformément aux règles nationales.

### Les dispositions réglementaires

2016/425:	Personal Protective Equipment (PPE) – Regulation (EU)
EN149:2001+A1:2009 EU type examination by:	Filtering half masks to protect against particles SGS Fimko Ltd. 0598
Production control according to Module D:	Notified body number: 0598 SGS Fimko Ltd. Takomotie 8 FI-00380 Helsinki
Official marks	



### IL EST IMPORTANT

VME peut varier d'un pays à l'autre.



### Fabricant: Respiratorniy Kompleks, SARL

3 Chekalova St., building 592, Leningradskaya obl.,  
GP Im. Morozova, 188679, Russia.

+7 (812) 329-11-65; zakaz@rkszpe.ru; www.rkszpe.com